

Emitent: Techtex SRL
Adresa: Strada 1, Nr 312, Sat Osorhei, jud Bihor
Numar document: IU-FMK-1405
Data emiterii: 22.07.2020
Versiune: 02

Instructiuni de utilizare

1. Identificare produsului

Cod produs	FMK-1405
Denumire produs	Dr. Albert Safemask KIDS - Masca de protectie de unica folosinta pentru copii
Descrierea produsului	Masca de protectie de unica folosinta pentru copii - 3 straturi/3 pliuri cu elastic

2. Cum se foloseste

Inainte de a intra in contact cu produsul spalati-va mainile cu apa si sapun.

Identificati banda metalica de fixare pe nas si orientati masca astfel incat banda sa fie pozitionata in partea de sus a mastii.

Pozitionati masca pe fata astfel incat banda metalica sa fie asezata pe nas si pliurile de pe partea interioara a mastii [cea dinspre fata] sa fie orientate in sus.

Asezati masca pe fata si fixati snurile elastice dupa urechi.

Extindeti masca tinand fixa partea superioara a ei si tragand de marginea inferioara, in asa fel incat sa acopere gura si barbia.

Dupa extinderea mastii, apasati si pliatii banda metalica pe nas pentru a fixa masca.

3. Cum se inlatura

Inainte de a inlatura masca spalati-va mainile cu apa si sapun.

Evitati atingerea celor 2 fete ale mastii, manipularea mastii se va face cu ajutorul snurilor elastice.

Prindeti cele 2 snuri elastice si inlaturati masca de pe fata.

Masca folosita se elimina conform recomandarilor aplicabile acestui tip de produs.

Dupa eliminare mastii de pe fata spalati-va mainile cu apa si sapun, inainte de a atinge alte suprafete.